

Anleitung zum Zuschneiden der verschiedenen Maskenfilter

In den Bartmasken, wie auch in den normalen Masken ist eine Tasche zur Aufnahme von Filtern eingenäht. Dabei können die üblichen Medizinalmasken als auch FFP2 Masken verwendet werden. Da es verschiedene Typen von FFP2 Masken gibt, zeigt das Beispiel nur eine der handelsüblichen Masken.

Zuschnitt und einsetzen von **Medizinalmasken**:

1. Die Medizinalmaske nicht aufgefaltet gemäss dem Muster zuschneiden.
2. Danach den ausgeschnittenen Filter (Bild 2) in die Tasche (Bild3) einfügen.
3. Zum Schluss wird der Filter durch die Öffnung in der Maske entfaltet.



Zuschnitt und einsetzen von **FFP2-Masken**:

1. Die FFP2-Maske nicht aufgefaltet gemäss dem Muster zuschneiden. (Der Schnitt am unteren Ende ermöglicht ein breiteres Aufklappen der Maske)
2. Danach den ausgeschnittenen Filter in die Tasche einfügen.
3. Sitz kontrollieren

